

HOMBRE

URSEC®

MUJER

ORINAL DE SEGURIDAD ANTI-REFLUJO

PARA DISCAPACITADOS, ENFERMOS DE PRÓSTATA, DE PARKINSON, AMBULANCIAS, ...
EL ÚNICO QUE SIN TAPA E INCLUSO BOCA ABAJO, RETIENE SU CONTENIDO DE HASTA 1 LITRO

ANTI-REFLUJO
SEGURIDAD PERMANENTE

MANGO AMOVIBLE
FOSFORESCENTE

MT-Rápido
CON TAPÓN DE VERTIDO

AIR PASS®

cómoda y reversible

Tapón de rosca siempre limpio : higiénico

GRADUACIONES

TULIPA
Ergonómica Separable

MUJER

MUESCAS
de presión

HIGIENE

Sin tapa sucia que manipular: acceso inmediato y práctico utilizable con una mano

HOMBRE

ANTI-REFLUJO
con sistema de rosca

no puede desensajarse ni verter el contenido

Contornos ergonómicos

Utilizable con una mano

1 LITRE


ESTERILIZABLE A 130°C
ó con lejía

Polipropileno: no amarillenta

TRANSPARENTE
SE NOTA SI ESTÁ LIMPIO O SI DEBE VACIARSE
Capacidad anti-reflujo : 1 litro

PARA PREVENIR EFICAZMENTE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES

Nunca más :

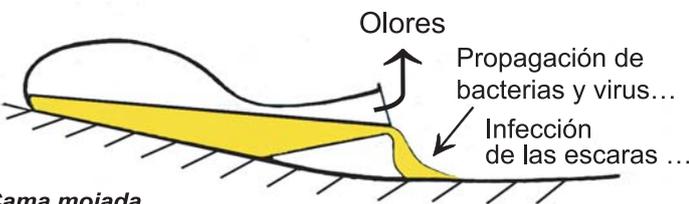


Cama mojada

→ ¡Incomodidad, costes de lavado, limpieza y desinfecciones !

La puerta abierta a los contagios ...

... ¡ CON URSEC !
ANTI-REFLUJO + DEFLECTOR

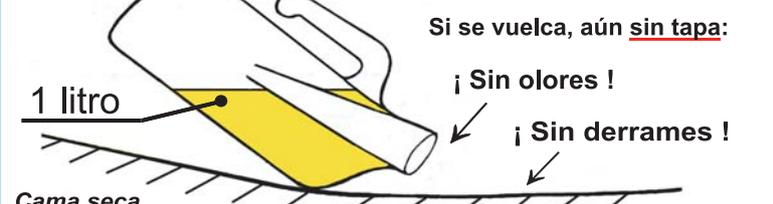

Cama seca

→ Comodidad y ahorro

¡ Las gérmenes quedan retenidos: higiene absoluta !

¡3 "ACCIDENTES" EVITADOS AHORRAN EL IMPORTE DEL URSEC!

Distribuido por:

Fabricado en Francia



Marcas y Modelos depositados
Patentes GOUGET en 21 países

Producto exclusivo de **GOUGET®** (Francia) - www.gouget.com

PRIX INTERMEDICA



PERFORMANCES

© 2016 GOUGET
Documento no contractual

HOMBRE**URSEC®****MUJER****ORINAL CON SISTEMA ANTI-REFLUJO, MT-RÁPIDO Y DEFLECTOR****EL ÚNICO QUE SIN TAPA E INCLUSO BOCA ABAJO, RETIENE SU CONTENIDO DE HASTA 1 LITRO**

- **SEGURIDAD ABSOLUTA** : el anti-reflujo de rosca no se desencaja accidentalmente. Fácil de limpiar (lejía).
- **PRÁCTICO** : ¡ sin tapa manchada y molesta que quitar ! Se puede usar inmediatamente.
- **CUERPO TRANSPARENTE** : control visual instantáneo (limpieza, nivel, aspecto del contenido).
- **EFICAZ AL 100%** : contiene hasta 1 litro sin rebosar sea cual sea la posición, aún cuando se vuelca.
- **URSEC NO TIENE TAPA** : no hay confinamiento de orina ni emanaciones de malos olores al abrirlo.
- **HECHO DE POLIPROPILENO HIPOALERGÉNICO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y REUTILIZABLE.**

**VENTAJAS PARA EL PACIENTE**


- No importa si al dormir el paciente se mueve en la cama : el **sistema anti-reflujo** mantiene las sábanas secas.
- **URSEC** se utiliza sin riesgos, incluso en la oscuridad. Su vaciado se realiza por el **MT-Rápido** (provisto de 2 tapones).
- Para obturar el MT-Rápido utilizar : - el tapón de rosca especial que se desenrosca normalmente ó - el tapón de seguridad diseñado para impedir cualquier apertura inoportuna.
- El diseño de **URSEC** permite una entrada más inclinada y accesible (**sin tapa que retirar**).
- Capacidad útil aproximada de un litro. Con **URSEC** en la cama, se puede dormir tranquilo y con toda confianza.
- **URSEC** tiene un mango **fosforescente** ergonómico amovible y reversible que resulta muy cómodo a los usuarios.

VENTAJAS PARA EL ESTABLECIMIENTO

- **SEGURIDAD** incluso si vuelca. **URSEC**, aún sin tapa, gracias a su **ANTI-REFLUJO**, no puede verter su contenido útil.
 - Evita manchar las camas (escaras...) y cambiarse de ropa. Impide la salida de microbios y disminuye el riesgo de infecciones nosocomiales. Permite ahorrar en gastos de limpieza y desinfección.
 - De noche, los **URSEC** se pueden dejar a mano en la cama, para que los pacientes no tengan que llamar para pedir ayuda.
 - Cerrados un 96%, los **URSEC** no desprenden prácticamente ningún olor. Su uso es silencioso. Los URSEC son reutilizables.
 - Fabricados en plástico reciclable, los **URSEC** tienen una discreta transparencia, lo que permite ver el nivel de llenado.
 - **URSEC** cuenta con un diseño agradable. Graduado. Dos **URSEC** reemplazan al envase de recogida de 24 horas.
 - Lavables con agua y lejía o desinfectante, o también con sistemas lavadores de orinales. Esterilizables en autoclave a 130°C.
 - El cuello del MT-Rápido permite tomar muestras y realizar un vaciado seguro y orientado, sin desprendimiento de olores.
 - ¡ Tres lavados de sábanas, pijamas y mantas "evitados" gracias al URSEC, bastan para ahorrarse el coste de la compra !
- A mayores, permite ganar tiempo evitando numerosos cambios de ropa de cama y baño de los pacientes.


URSEC : LIMPIEZA ASEGURADA**MEJORANDO LA HIGIENE DE LOS CENTROS DE CUIDADOS, URSEC CONTRIBUYE A SU ACREDITACIÓN****INSTRUCCIONES DE USO**

Limpiar los URSEC antes y después de cada uso.
 Se utilizan en la cama, horizontalmente o con leve pendiente.
 Deben ser siempre utilizados con el cono anti-reflujo verde roscado.
 Deben ser vaciados antes de que el contenido alcance la marca de 1 litro.
 El material de polipropileno no se amarillea y la orina no se adhiere.
 No más orinales opacos que con el tiempo cogen un color dudoso.
 Basta con un enjuague para que los URSEC queden claros.

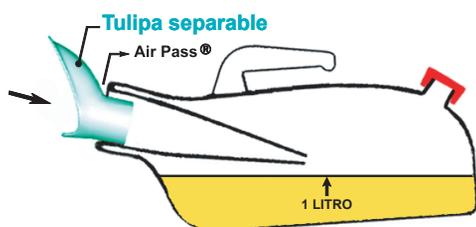**URSEC + TULIPA = URSEC FEMENINO****LIMPIEZA - ESTERILIZACIÓN**

Para URSEC Femenino : separar la tulipa.
 Luego, para ambos modelos :
 Separar el ANTI-REFLUJO y el MT-Rápido,
 lavar todo con agua fría y lejía
 o desinfectante, con o sin lava-orinales.
 Esterilizable en autoclave a 130° C
 (salvo el tapón de seguridad) o tratar todo
 el sistema con óxido de etileno.
 Enroscar el ANTI-REFLUJO y el MT-Rápido.

Mango fosforescente amovible y reversible

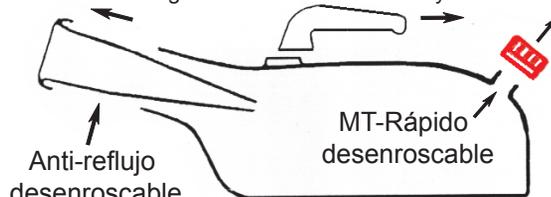**URSEC PARA HOMBRE****¡3 "ACCIDENTES" EVITADOS AHORRAN EL COSTE DEL URSEC: CON EL USO ES EL MÁS BARATO!****LIMPIEZA ASEGURADA**