

Quattro

LÍNEA

¡De bastón a cómoda silla en un instante!

Gracias por elegir el modelo Quattro de Linden. Le deseamos muchos años de uso satisfactorio. Para su completa seguridad, lea todas las instrucciones:

- Quattro 32 – Altura andando: 815 mm
Altura del asiento: 480 mm
- Quattro 34 – Altura andando: 865 mm
Altura del asiento: 525 mm
- Quattro 37 – Altura andando: 940 mm
Altura del asiento: 590 mm
- Peso máximo del usuario: 125 kg.

Su modelo Quattro se complementa con 4 conteras de goma y ha sido diseñado para usarse en superficies planas y no deslizantes.

NOTA: Compruebe con regularidad que todas las conteras de goma estén en buenas condiciones. Por su seguridad, **NUNCA** use la silla si falta alguna contera de goma.



1. Para usar como silla: extiéndalo totalmente y asegúrese que todas las patas están en contacto con el suelo.
2. Siéntese lentamente. Para una mayor estabilidad es importante que cuando esté sentado mantenga sus piernas en el frente con ambos pies apoyados firmemente en el suelo.
3. El modelo Quattro está pensado únicamente para uso individual. No usar para ninguna otra actividad.



MODELOS SPORT

Los modelos Sport con la puntera y roseta adicionales pueden usarse en suelos blandos quitándole las conteras de goma. Vuelva a poner las conteras de goma para usar la silla en suelos duros.



MODELOS
DISPONIBLES

Estructura
de aluminio
pulido y tela
en color

o

"Deluxe" con
estructura
pintada para
combinar
con el color
del asiento –

COLORES
DISPONIBLES:
Negro o verde

