

Trio

LÍNEA

¡De bastón a cómoda silla en un instante!

Gracias por elegir el modelo Trio de Linden. Le deseamos muchos años de uso satisfactorio. Para su completa seguridad, lea todas las instrucciones:

- **Trio Popular** – Altura andando: 845 mm
Altura del asiento: 455 mm
- **Trio Maxi** – Altura andando: 870 mm
Altura del asiento: 575 mm
- **Peso máximo del usuario: 125 kg.**

Su modelo Trio se complementa con 3 conteras de goma y ha sido diseñado para usarse en superficies planas y no deslizantes.

NOTA: Compruebe con regularidad que todas las conteras de goma estén en buenas condiciones. Por su seguridad, **NUNCA** use la silla si falta alguna contera de goma.



1. Para usar como silla: extiéndalo totalmente y asegúrese que todas las patas están en contacto con el suelo.
2. Siéntese lentamente. Cuando esté sentado el asa siempre debe quedar detrás de usted y sus pies deben estar apoyados en el suelo (ver foto).
3. El modelo Trio está pensado únicamente para uso individual. No usar para ninguna otra actividad.



MODELOS SPORT

Los modelos Sport con la puntera y roseta adicionales pueden usarse en suelos blandos quitándole las conteras de goma. Vuelva a poner las conteras de goma para usar la silla en suelos duros.



MODELOS
DISPONIBLES

Estructura
de aluminio
pulido

o

"Deluxe" con
estructura
pintada para
combinar
con el color
del asiento –

COLORES
DISPONIBLES:

Negro, marrón
o verde.

